


# ニューモキヤス

PNEUMOCATH(8F) / NEO-PNEUMOCATH(10F)

胸腔ドレナージ用カテーテル

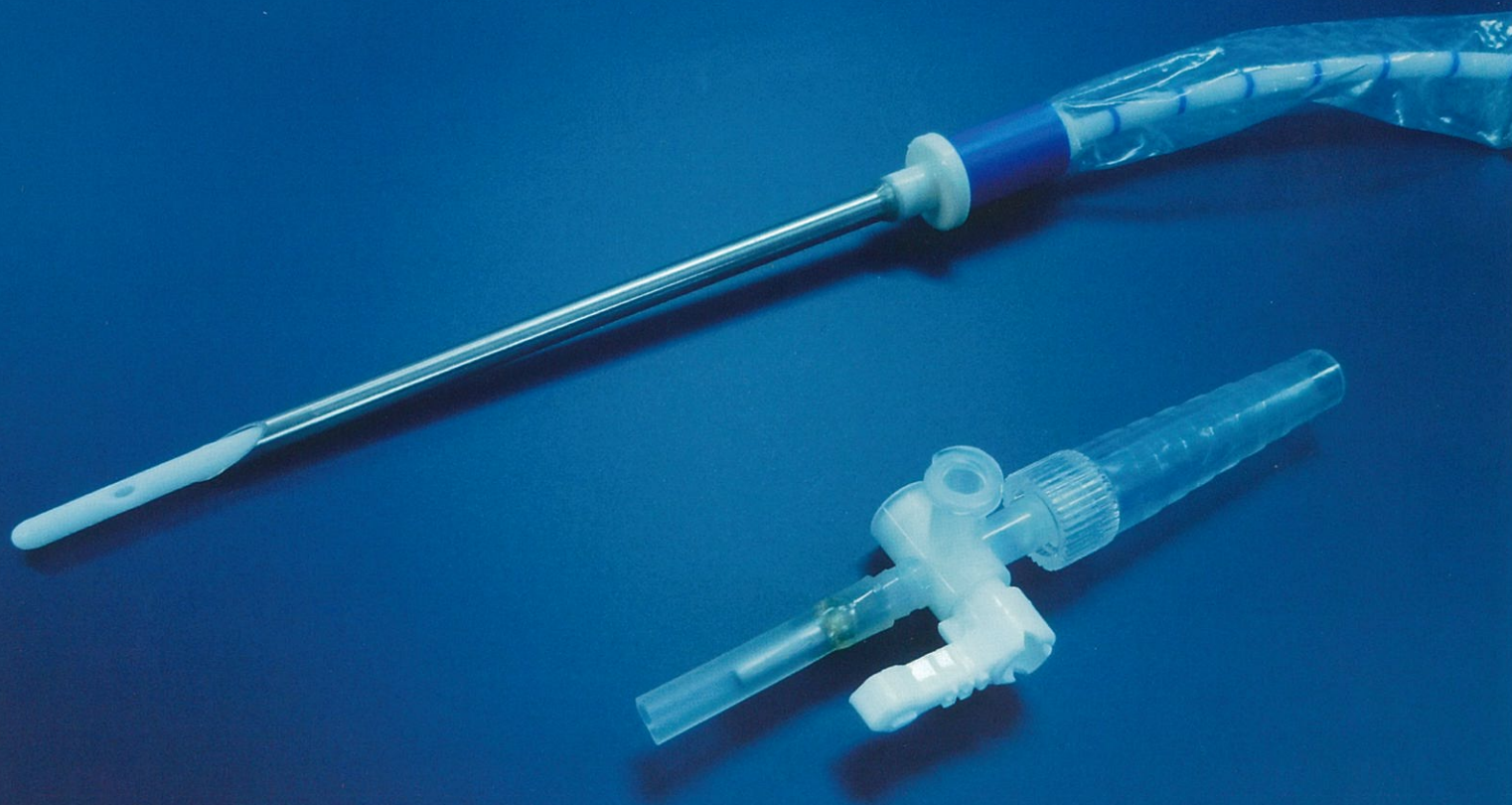

イントラ社設計のカテーテル挿入システム

# ニューモキヤス

## PNEUMOCATH(8F) / NEO-PNEUMOCATH(10F)

### 胸腔ドレナージ用カテーテル

#### イントラ社設計のカテーテル挿入システムを採用

- 鋭利な外套針の中から、カテーテルを挿入するシステムです。
- カニューレが胸腔内に達した際、カテーテル保護カバーの膨らみにより胸腔内が陰圧か陽圧かを確認できます。
- カテーテル先端は丸い形状で臓器などの損傷リスクを抑えます。
- 穿刺時に抵抗がかかる状態では、カテーテルはカニューレ内に押しこまれ、胸腔内に達した時など、カテーテル先端に抵抗が無い状態では、カテーテルはカニューレから飛び出した状態になります。



穿刺時



腔に到達時



カテーテルはカニューレの中に収まっています。

#### サイドホール(10穴)

- カテーテル先端から10cmの間に、左右5穴ずつ交互に配置されています。

#### ルアーロック活栓・その他チューブ用接続アダプタ対応

- 活栓はルアーロックタイプで、太いチューブ対応のアダプタも付いています。

(販売名:ニューモキヤス 認証番号:230ADBZX00072000)

シリーズ	型番	構成品	外径	針長	カテーテル長	入り数
ニューモキヤス	503001	ニューモキヤスカテーテル(保護カバー付き) チューブアダプター付き三方活栓	8F	85mm	50cm	10本/箱
ネオニューモキヤス	503011	ネオニューモキヤスカテーテル(保護カバー付き) チューブアダプター付き三方活栓	10F	85mm	50cm	10本/箱

シリーズ	型番	形状	長さ	販売単位
サクシオンチューブ	503050	ルアーロックシリコンアダプタ	50cm	20本/箱

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。 ※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
http://www.sheen-man.co.jp  
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114  
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522  
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401  
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業