

整形用品 04 整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 (JMDNコード：70444000)
エムフィックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】
使用方法
再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

組成


ポリエチレン、ポリウレタン、アクリル系粘着剤

形状

<全体図>

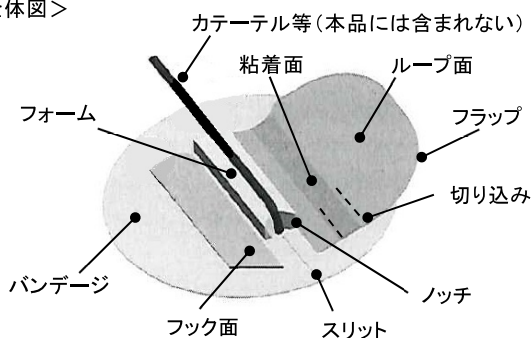

<バンデージ粘着面側>

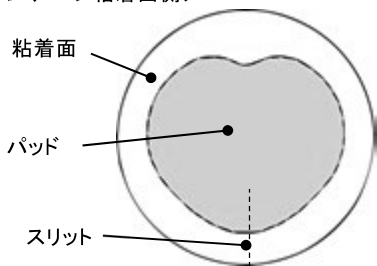

適応カテーテルサイズ：6F～16F

【使用目的又は効果】

使用目的

経皮的ドレナージカテーテルの刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

【使用方法等】

使用方法

1. バンデージとパッドのスリットをカテーテル等の刺入部位付近にスライドさせていき、カテーテル等がフォームのノッチに沿うように配置する。




2. バンデージとパッドの剥離紙を剥がし、本品を皮膚表面に貼付する。




3. フォームとフラップの粘着面を覆う剥離紙を剥がし、カテーテル等をフォーム上の粘着面に密着させるように乗せて軽く押さえる。



4. フラップを持ち、フラップの粘着面がカテーテル等を押さえるようにかぶせて、ループ面（面ファスナーメス）をフック面（面ファスナーオス）に合わせて固定する。

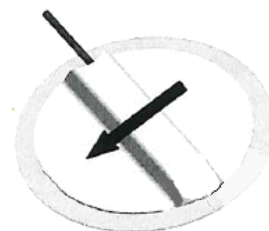

5. フラップの2本の切り込みで囲まれた部分（裏面が粘着面）をフォームとバンデージ面に沿わせるように上から押さえて、すき間ができないように固定する。

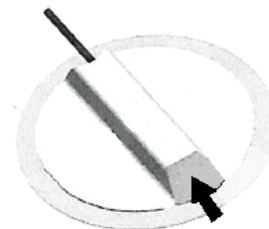

使用方法等に関連する使用上の注意

本品を貼付する際、カテーテル等、固定する医療機器に損傷を与えないように十分に注意を払うこと。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

- 1.本品を適応外サイズのカテーテル又はチューブに使用しないこと。
- 2.本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止すること。
- 3.滲出液の漏出が認められたり、粘着力の低下が認められたりした場合は直ちに交換すること。

重大な不具合

- ・ずれ
- ・外れ

重大有害事象

- ・発赤
- ・痒み
- ・感染

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等 Avoiding water damage, direct sunlight, high temperature and humidity, and impact, etc. to ensure proper storage.

有効期間

製品包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**【製造販売業者】**

スーガン株式会社

TEL: 06-6354-6181

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】

信頼をかたちに

シーマン株式会社[®]

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号

<http://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06)-6354-7702 FAX. (06)-6354-7114