



# アイフィックス ヘッドマスク&フリースシート

～やさしさと固定力の実現～

Head stabilization with the iFIX Head Mask




Head stabilization




# ヘッドマスク 使用方法



1 患者に適したサイズのヘッドマスクを選択します

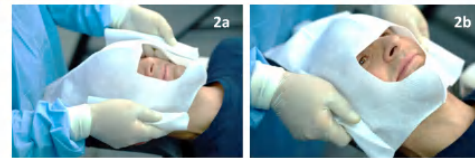


2 患者の目、鼻、および口を覆わないように注意しながら患者の顔にヘッドマスクを置きます

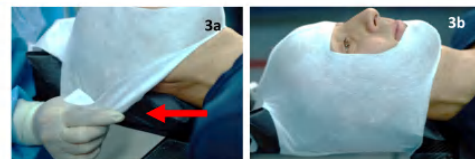

3 ヘッドマスクをパッドに貼り付けて患者を固定します



4 必要に応じて、締め付け具合を調整します

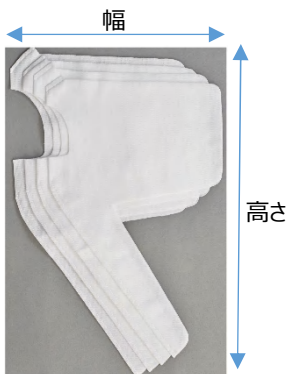

型番	商品名	仕様	販売単位
26102	ヘッドマスク XS	幅33cm×高さ41cm	10枚/箱
26105	ヘッドマスク S	幅33cm×高さ43cm	
26104	ヘッドマスク M	幅33cm×高さ45cm	
26103	ヘッドマスク L	幅33cm×高さ47cm	
29341	ヘッドマスク XL	幅33cm×高さ49cm	
35080	ヘッドマスク EL	幅58cm×高さ62cm	



型番	商品名	仕様	販売単位
31618	フリースシート 5cmX30m	5cm×30m	1ロール/箱
16304	フリースシート 15cmX200m	15cm×200m	
17674	フリースシート 50cmX30m	50cm×30m	



拡大図：アンカーシステムにフリースの繊維がからみついた状態

型番	商品名	仕様	販売単位
CIF1212B00	パッド 12cmX10.5cm	12cm×10.5cm	10枚/袋

\* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。 \* 再使用はしないでください。 \* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

発売元

信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
http://www.sheen-man.co.jp  
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114  
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522  
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401  
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338


製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業





# アイフィックス パッド&アダプタ

～やさしさと固定力の実現～

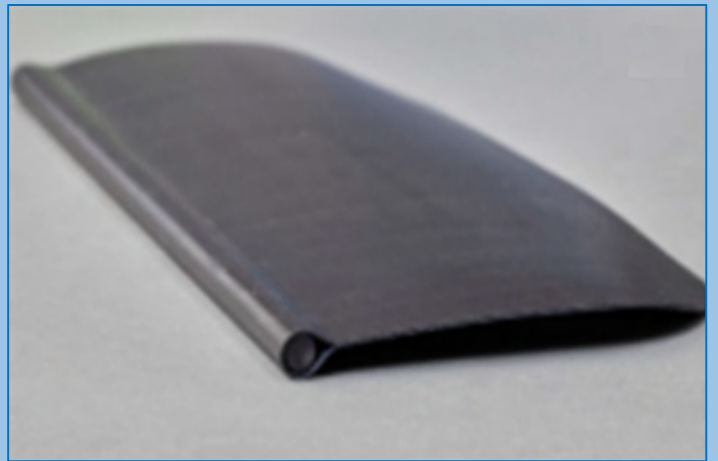



スロットアダプタ使用方法

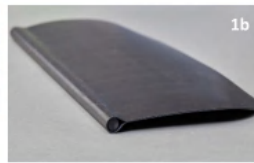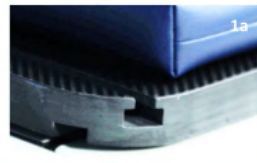

1

検査台等のレールに適したサイズのスロットアダプタを選択します



2


スロットアダプタのロッド部を検査台等のレール部に挿入します

スロットアダプタ、パッド、パッドアダプタ フリースシート使用方法と清掃方法



1

固定に適したサイズのフリースシートを選びます。  
フリースシートをパッドに貼り付け、必要に応じて締め付け具合を調整します

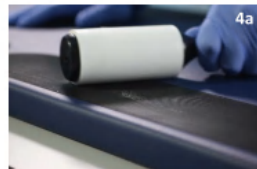

2


表面に残ったフリースシートは市販の粘着ローラーを使用し除去してください  
使用後パッドのマイクロフック表面はアルコール等の消毒剤できれいに清掃してください

※詳細は添付文書を確認して下さい


スロットアダプタ



パッド

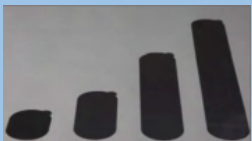

パッドアダプタ

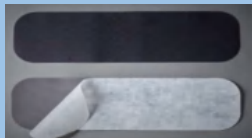

型番	商品名	仕様	販売単位
38037	スロットアダプタ 2.0/30	12cmX30cm (ロッド3mm)	4枚/箱
17622L003	スロットアダプタ 3.0/30	12cmX30cm (ロッド4mm)	4枚/箱
16192L003	スロットアダプタ 8.0/30	12cmX30cm (ロッド9.5mm)	4枚/箱
33224	スロットアダプタ 10.0/30	12cmX30cm (ロッド11mm)	4枚/箱
39775	スロットアダプタ ウイングシェイプ	12cmX30cm (ロッド4mm)	4枚/箱
35193	スロットアダプタ 12.0/9	12.5cmX9cm (ロッド12mm)	8枚/箱

型番	商品名	仕様	販売単位
32982	パッド ヘッドマスク用	6cmX15cm	3枚/箱
16180L001	パッド 15	10cmX15cm	8枚/箱
16180L002	パッド 25	10cmX25cm	6枚/箱
16180L005	パッド 50	10cmX50cm	4枚/箱
16180L007	パッド 75	10cmX75cm	4枚/箱

型番	商品名	仕様	販売単位
16179L001	パッドアダプタ	15cmX50cm	4枚/箱

※本品は、アイフィックス及びアイフィックスGの固定フリース専用品です。

\* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しく使用ください。 \* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

発売元



信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
http://www.sheen-man.co.jp

本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114  
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522  
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401  
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業