



# Curera Positioning



キュレラ ポジショニング

## Curera Rectangular Pillow

キュレラ レクタンギュラーピロー



## Curera Positioning Roll

キュレラ ポジショニングロール



## Curera Multi Pillow

キュレラ マルチピロー



## Curera Support Wedge

キュレラ サポートウェッジ



こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



## Care of Swedenのミッション

Care of Swedenはヘルスケア分野において、  
専門職の方々より有益な知識と経験を共有し、  
強固な信頼関係を築いてきました。

専門職の方々が私たちに教えてくれた知識と経験は、  
エビデンスに基づいた

適正なケアを提供することの大切さでした。

そして、ケア提供者の方々が日々無理のない、

ご自身の健康を損なわずプロフェッショナルの

仕事が継続できる労働環境の実現でした。

その中で私たちの仕事は、


専門職の皆さまが私たちの製品を有効活用し、

その結果、より良いケアの決定を支えることです。

私たちは製品を使用する方々のQOLをより良くし、

日々のケアの提供をよりしやすくすることに

お役に立ちたいと願っています。

 care of sweden は EPUAP (欧州褥瘡諮問委員会) のスポンサーであり、クイックリファレンスガイド\*の活用を奨励しています。

\* クイックリファレンスガイド  
National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Western Australia; 2014

## キュレラ ポジショニングシリーズはシンプルな ポジショニングをご提案します。

### 1 内容物(高反発ウレタンフォーム入り)の偏りが起きにくいです

- ・復元性が高いので、使用毎に内容物の偏りを整えることなくそのまま使用できます。
- ・支えたい身体部位にピロー・ロールを敷きこむだけのシンプルな使い方です。
- ・ピロー・ロールが身体の重さを受け止め、馴染むことで、身体を支えます。

### 2 便失禁・尿失禁など汚物が付着してもカバーの中に入りにくい素材です

防水透湿性のハイジーンカバーを標準仕様にしてあります。日頃のお手入れは洗剤や消毒液の清拭で対応可能です。止水ファスナーを採用しています。必要に応じてハイジーンカバーとピロー・ロール本体は95℃までの液温で、洗濯機で洗えます(サポートウェッジ本体は洗えません)。

### 3 製品保証は1年間です

#### <参考：使用前後の比較>

約1年間使用した製品と未使用の製品の比較試験を行いました。

試験方法：コンピュータ計測制御式万能試験機を使用し、各3か所に20Nの力を加え、その厚さの平均を算出しました。

試験者：高橋誠特別研究員 日本医療大学、NPIAP (米国褥瘡諮問委員会) S3I委員かつ学会員、EPUAP (欧州褥瘡諮問委員会) 学会員

品名	サイズ (cm)	厚さ平均値 (mm)	
		1年使用済み	未使用
レクタンギュラーピロー S	25 x 80	52	60
レクタンギュラーピロー L	50 x 85	70	69
マルチピロー	60 x 70	38	39
ポジショニングロール L	20 x 225	66	70
サポートウェッジ	70 x 26 x 15/5	6	5

\*測定値はあくまで参考値であり、製品保証するものではありません



コンピュータ計測制御式万能試験機

## 本体の内容物の偏りが気になった場合の調整方法

(例：1年使用後のレクタンギュラーピロー Lサイズ)




1 内容物が偏ったピローです。



2 ファスナーを適当に開けます。



3 ピローの横方向から偏りを整えます。

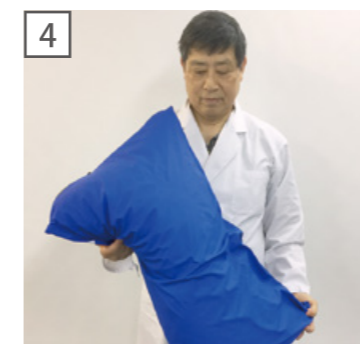

4 ピローの縦方向から偏りを整えます。



5 ファスナーを閉じます。



6 完了です。

# Curera Positioning

キュレラ ポジショニング



寝たきりで十分に動くことができない被介護者では床ずれ発生のリスクが高まります。定期的に体位変換を行うことで、このリスクを軽減し、快適さを向上させることができます。

Care of Swedenはサポートと除圧に関する様々なニーズをカバーする様々な安定したピローとウェッジを開発しました。Curera Positioningは創傷管理、体位変換、様々な介助に活用できます。

## Curera Rectangular Pillow

キュレラ レクタングュラーピロー

### 全ての姿勢をサポートするためのピロー



CE : 適用されるEU法令の条項に適合していることを表すマーク。



製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

#### スペック

品名	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
レクタングュラーピローS	14-001210	25cm×80cm	01624-000018 (TAIS)	14,000円
レクタングュラーピローM	14-001211	50cm×60cm	01624-000024 (TAIS)	22,000円
レクタングュラーピローL	14-001212	50cm×85cm	01624-000017 (TAIS)	25,800円

付属カバー：ハイジーンカバー 販売単位：1個

レクタングュラーピローS用ハイジーンカバー単品	14-001110	25cm×80cm	4562110152698 (JAN)	7,800円
レクタングュラーピローM用ハイジーンカバー単品	14-001111	50cm×60cm	4562110152704 (JAN)	10,000円
レクタングュラーピローL用ハイジーンカバー単品	14-001112	50cm×85cm	4562110152711 (JAN)	12,000円

販売単位：1枚


#### ■製品情報

内容物：高反発ウレタンフォーム/ポリエステルファイバー  
カバー：ポリウレタン/ポリエステル  
保証期間：1年

#### ■お手入れ方法

ハイジーンカバーは防水透湿性です。洗剤や消毒液で清拭可。液温は95°Cまで。洗濯機使用可。  
ピロー本体：液温は95°Cまで。洗濯機使用可。タンドル乾燥可。タンドル乾燥の場合は乾いたらすぐに乾燥機を止めること。より早く乾燥させるには遠心脱水を3~4回行ってください。

## ポジショニングの例

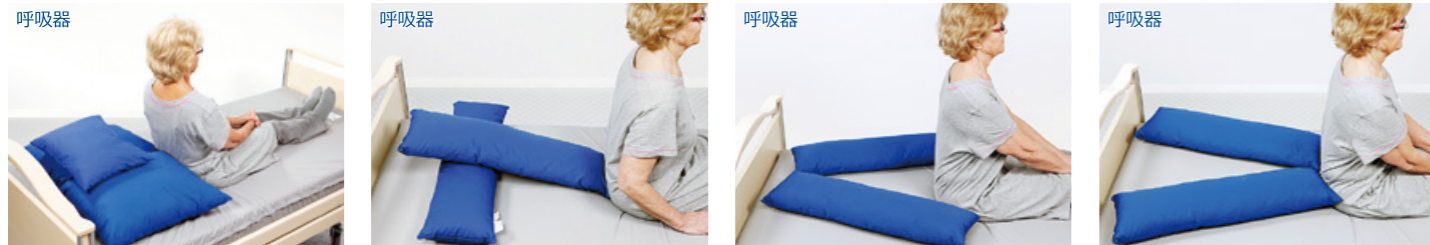

呼吸器  
呼吸が困難な場合や一般的な肺の拡張に。

呼吸器  
Tポジション：呼吸が困難な場合の一般的な肺の拡張に。

呼吸器  
Aポジション：呼吸が困難な場合の肺の上部の拡張に。肩甲骨と脊椎の部分をサポート。

呼吸器  
Vポジション：呼吸が困難な場合の肺の下部の拡張に。



脳卒中  
脳卒中におけるポジショニング：右麻痺の座位。



脳卒中  
脳卒中におけるポジショニング：右麻痺の臥位。



脳卒中  
脳卒中におけるポジショニング：左麻痺の臥位。



術後・その他  
人工股関節置換術後のサポートとして。



術後・その他  
側臥位のサポートとして。



術後・その他  
腕や手が腫れている場合。

# Curera Positioning

キュレラ ポジショニング



寝たきりで十分に動くことができない被介護者では床ずれ発生のリスクが高まります。定期的に体位変換を行うことで、このリスクを軽減し、快適さを向上させることができます。

Care of Swedenはサポートと除圧に関する様々なニーズをカバーする様々な安定したピローとウェッジを開発しました。Curera Positioningは創傷管理、体位変換、様々な介助に活用できます。

## Curera Positioning Roll

キュレラ ポジショニングロール

### 除圧とポジショニングのためのオールラウンドピロー



CE : 適用されるEU法令の条項に適合していることを表すマーク。



製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

#### スペック

品名	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
ポジショニングロールS	14-001256	15cm×60cm	01624-000021 (TAIS)	16,800円
ポジショニングロールM	14-001255	20cm×125cm	01624-000020 (TAIS)	32,000円
ポジショニングロールL	14-001254	20cm×225cm	01624-000019 (TAIS)	42,000円

付属カバー：ハイジーンカバー 販売単位：1個

ポジショニングロールS用ハイジーンカバー単品	14-001143	15cm×60cm	4562110151066 (JAN)	7,800円
ポジショニングロールM用ハイジーンカバー単品	14-001142	20cm×125cm	4562110151059 (JAN)	12,000円
ポジショニングロールL用ハイジーンカバー単品	14-001141	20cm×225cm	4562110151042 (JAN)	19,000円

販売単位：1枚

#### ■製品情報

内容物：高反発ウレタンフォーム/ポリエステルファイバー  
カバー：ポリウレタン/ポリエステル  
保証期間：1年

#### ■お手入れ方法

ハイジーンカバーは防水透湿性です。洗剤や消毒液で清拭可。液温は95°Cまで。洗濯機使用可。  
ピロー本体：液温は95°Cまで。洗濯機使用可。タンドル乾燥可。タンドル乾燥の場合は乾いたらすぐに乾燥機を止めること。より早く乾燥させるには遠心脱水を3~4回行ってください。

## ポジショニングの例 (他のピローとの組み合わせを含む)



座位または臥位どちらの姿勢もサポート。他のピローと組み合わせて体を安定させる。体の感覚に対する意識を高める効果が期待できる。



座位または臥位どちらの姿勢もサポート。他のピローと組み合わせて体を安定させる。体の感覚に対する意識を高める効果が期待できる。



安静とリラクゼーションを得ることで、心身の負担を和らげる。



側臥位をサポート。



肩、脊椎、腰、臀部、かかとのサポート。



座位のサポート。腕のサポート。



腕や手が腫れている場合。



膝の圧迫を防ぎ、足をサポートする。

# Curera Positioning

キュレラ ポジショニング



寝たきりで十分に動くことができない被介護者では床ずれ発生のリスクが高まります。定期的に体位変換を行うことで、このリスクを軽減し、快適さを向上させることができます。

Care of Swedenはサポートと除圧に関する様々なニーズをカバーする様々な安定したピローとウェッジを開発しました。Curera Positioningは創傷管理、体位変換、様々な介助に活用できます。

## Curera Multi Pillow

キュレラ マルチピロー

### 膝とかかとの除圧のためのピロー



CE：適用されるEU法令の条項に適合していることを表すマーク。

ピローにはハイジーンカバーが付属します。

Curera Positioningの使い方は簡単で、様々な形でポジショニングをサポートします。

詳細や製品の使い方に関するトレーニングについては、お気軽にお問い合わせください。

#### スペック

品名	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
マルチピロー	14-001230	60cm×70cm	01624-000022 (TAIS)	29,800円

付属カバー：ハイジーンカバー 販売単位：1個

マルチピロー用ハイジーンカバー単品	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
	14-001130	60cm×70cm	4562110152728 (JAN)	14,000円

販売単位：1枚

#### ■製品情報

内容物：高反発ウレタンフォーム/ポリエステルファイバー  
カバー：ポリウレタン/ポリエステル  
保証期間：1年

#### ■お手入れ方法

ハイジーンカバーは防水透湿性です。洗剤や消毒液で清拭可。液温は95°Cまで。洗濯機使用可。  
ピロー本体：液温は95°Cまで。洗濯機使用可。タンブル乾燥可。  
タンブル乾燥の場合は乾いたらすぐに乾燥機を止めること。  
より早く乾燥させるには遠心脱水を3~4回行ってください。



製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

### ポジショニングの例 (他のピローとの組み合わせを含む)



側臥位のサポートとして。



側臥位のサポートとして。



かかどに圧力がかからないようにし、足をサポートする。



かかとの除圧として。



痙縮の場合の姿勢安定に。



膝下のサポートとして。

# Curera Positioning

キュレラ ポジショニング



Curera Support Wedgeを使用して被介護者を側臥位にすることができます。これにより、床ずれの発生しやすい仙骨部の圧迫を防ぎます。側臥位にはサポートウェッジを2つ使用します。

サポートウェッジは使いやすく清潔です。防水性カバー付きで、カバーは洗剤や消毒液で拭くことができます。また、洗濯機で洗うこともできます。  
サポートウェッジは使用するマットレスに応じて、さまざまな配置が可能です。  
詳細については下の画像または取扱説明書をご覧ください。



(サポートウェッジ配置の例)

## Curera Support Wedge

キュレラ サポートウェッジ

### ポジショニングと体位変換用



#### スペック

品名	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
サポートウェッジ	51-100001	70cm×26cm×5~15cm	01624-000023 (TAIS)	18,000円

付属カバー：ハイジーンカバー 販売単位：1個

サポートウェッジ用ハイジーンカバー単品	型番	サイズ	コード	定価(税抜)
	51-100002	70cm×26cm×5~15cm	4562110151035 (JAN)	9,200円

販売単位：1枚

#### ■製品情報





内容物：ポリウレタンフォーム  
カバー：ポリウレタン/ポリエステル  
保証期間：1年  
カバー手入れ：洗剤や消毒液で清拭可。  
カバーの洗濯・乾燥：液温は95°Cまで。洗濯機使用可。タンブル乾燥可。

CE：適用されるEU法令の条項に適合していることを表すマーク。



製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

### ポジショニングの例

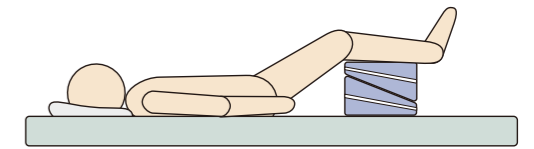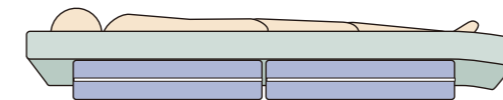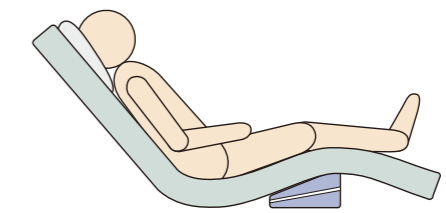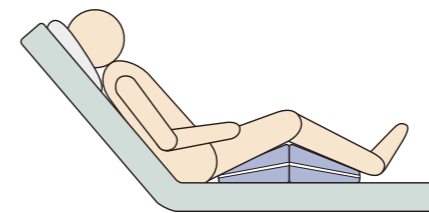

#### ■使用例

- ・ベッドレール起因のリスク防止
- ・床ずれ防止のための除圧
- ・被介護者が完全な側臥位を取るの難しい場合
- ・被介護者が体位変換を行うの難しい場合
- ・その他のポジショニング

# Supporting life

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。 ※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

  
信頼をかたちにする  
**シーマン株式会社**  
<https://www.sheen-man.co.jp>  
本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114  
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522  
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401  
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業