

ソラシックベント

[気胸ドレナージキット]



気胸治療に

自然気胸や医原性気胸等の単純気胸に適応。

特徴と利点

カテーテル・バルブ 一体型

患者の動きの邪魔になりにくいコンパクト設計なので、
外来治療での使用も可能です。


排液機能

デバイス内の貯留液を容易に
排液できます。

*血胸および多量の排液のある症例には
適しません。

保険適用

特定保険医療材料として、
「套管針カテーテル(3)特殊型」に
分類されています。

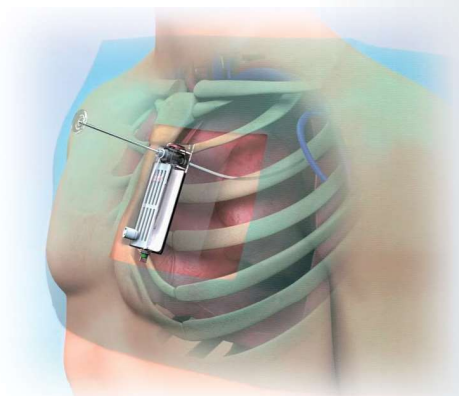


前胸壁に貼付します。カテーテルが体表に出ない、キンクや脱落を起こしにくい構造です。




ソラシックベント [気胸ドレナージキット]

保険適用 保険分類:套管針カテーテル(3)特殊型


本体仕様

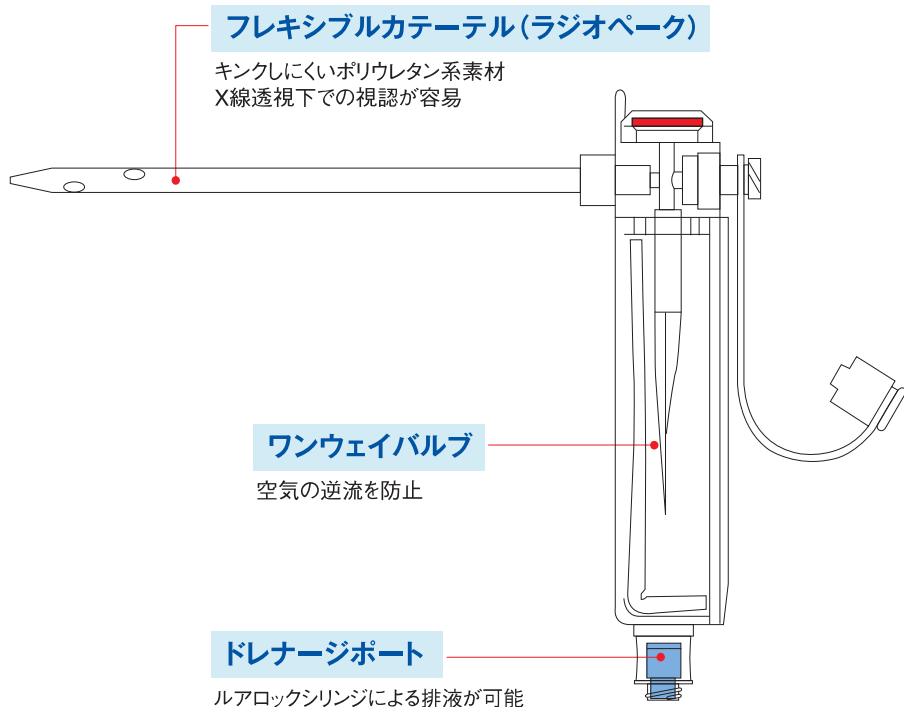

気胸シグナルダイヤフラム

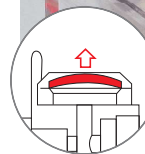

胸腔内圧が大気圧に対し、陽圧(+6mmHg)の時、ダイヤフラムが上方に膨らみます。胸腔内へのカテーテルの挿入が容易に確認できます。

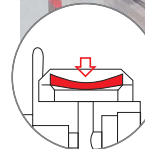

胸腔内圧が大気圧に対し、陰圧(-6mmHg)の時、ダイヤフラムが下方へこみます。

構成内容



- | | | | |
|---|----|----------------------|----|
| ① ソラシックベント本体 | 1個 | ⑥ スカルペル(切開刀) | 1本 |
| ② トロッカー | 1本 | ⑦ ガーゼ | 2枚 |
| ③ アスピレーションカニューレ
(ワンウェイバルブが組み込まれ、
シリンジにより連続排気が可能です。) | 1個 | ⑧ 有窓ドレープ | 1枚 |
| ④ シリンジ | 1本 | ⑨ オクリュージョンプラグ(クランプ用) | 1個 |
| ⑤ クランプ付サクシジョンチューブ
(持続吸引器への接続が可能です。) | 1本 | | |

ソラシックベント規格表

型番	外径(Fr)	長さ(cm)	販売単位
TV11-13E	11	13	1セット/箱
TV13-10E	13	10	
TV13-13E	13	13	

販売名:ソラシックベント 承認番号:20700BZY00139000

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。 ※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>
 本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
 TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
 東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
 九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
 名古屋支店 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
 第一種医療機器製造販売業