



スウェーデンより登場

スタンディングアシスト&ベルト

Takeoff & Takeoff Belt

テイクオフ

テイクオフベルト

使用例

● 機能訓練

1. 立ち上がり状態の確認
2. 起居動作の補助
3. 術後やベッドサイドリハビリテーションでの使用

● 日常生活動作(ADL)支援

1. 室内の短距離移動
2. 足の踏み替えに代わる方向転換



テイクオフベルト



テイクオフ

使用対象者

* 使用前に被介助者の動作状態の確認を行います

- 補助があれば立ち上がりや立位姿勢が取れて、バランスも取れる人
- スタンディングハンドルをつかめて、介助者の指示が理解できる人

トイレ介助例



■ トイレに入室します



■ テイクオフベルトを巻き上げます



■ 着衣を下ろします



■ 着座します



■ 排泄中はハンドルを把持します



■ 立位姿勢をとります



■ 清拭し、着衣を整えます



■ トイレより退室します

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



使用例 ◆機能訓練

立ち上がり状態の確認


既入院患者さんや入所者さんの動作状態の確認に使用できます。



被介助者の動作状態の確認を行います。



＜座位姿勢の確認＞

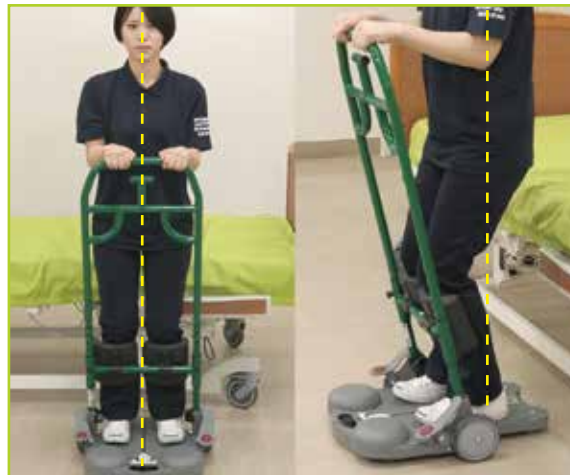

＜立位姿勢の確認＞

起居動作の補助

立位姿勢が取れる方の立ち上がり動作を補助します。



足型イラストに足を乗せます。



レッグサポートを調整します。



スタンディングハンドルをつかみます。



体の中心の位置を確認します。

テイクオフベルト(別売)と併用できます。



介助者は前方より補助します。



ストラップの長さを調整します。

ベッドサイドリハビリテーション

手術後の立ち上がりや、ベッドサイドリハビリテーションのプログラムが実施できます。



立ち上がりトレーニングとして時間を測り、被介助者の動作状態の確認を行います。



ベッドの高さ調整により、負荷を変えてトレーニングできます。



重度被介助者にはテイクオフベルトを併用します。

使用例 ◆日常生活動作(ADL)支援

室内の短距離移動

被介助者の視線が高くなるため、視覚情報が増えます。足底に体重がかかり、自然に被介助者の下肢に力が入ります。



介助者は自分の方向にテイクオフを引きます。

ポイント

テイクオフ前方の大型車輪により、小さな段差を乗り越えられます。



敷居レール例



カーペットの断端例

テイクオフベルト(別売)と併用できます。



＜介助者1名＞



＜介助者2名＞

トイレ介助

コンパクト設計のベースにより、狭い空間でも取り回しができます。同じ基点でベースが回転できるので、トイレ介助がしやすいです。



狭い空間でもアプローチしやすいです。



被介助者の正面でスタンディングハンドルをつかめます。




半座位姿勢が取りやすいです。



その場で方向転換ができます。

テイクオフベルト(別売)と併用できます。

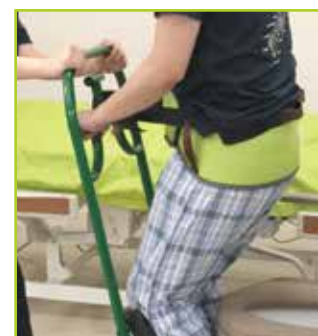

ストラップをTサポートに引っ掛けて姿勢を保持します。



テイクオフベルトの下部分をまくり上げます。

テイクオフベルト使用例 ◆歩行訓練 ◆車いす移乗

歩行訓練

ストラップハンドルをつかむことで、しっかりサポートできます。



＜介助者1名＞



＜介助者2名＞
介助者の腕を交差させて、安定感を増したサポートができます。

被介助者のズボンやおむつをつかむ事なく、介助者は安定してサポートできます。

車いす移乗

重度被介助者の場合はテイクオフベルトとの併用をお勧めします。



お互いがストラップをつかめるので、姿勢が安定します。



被介助者の背面からサポートします。



＜介助者2名＞



＜介助者2名＞
座奥へしっかり座れます。



■ パーツ

Takeoff ティクオフ



Tサポート



レッグサポート



ブレーキプレート



ベース

Takeoff Belt ティクオフベルト



バックル付きベルトストラップ



ストラップハンドル



介助時の折り返し

■ アクセサリ

Soft Cover Leg Support ソフトカバーレッグサポート

レッグサポートの当たりを和らげるソフトカバーです



< スペック表 >

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重・重量	お手入れ	TAISコード JANコード	販売単位	定価(税抜)
----	----	-----	------	--------	------	-------------------	------	--------

■ テイクオフ 介護保険：福祉用具貸与(移動用リフト)

TOFFM	スタンディングアシスト ティクオフ	ベース：横幅約47cm、奥行幅約57cm 製品全体：高さ約105cm	ベース：グレー、鉄 支柱：グリーン、鉄	耐荷重：150kg *身長180cm以下	柔らかい布で中性洗剤を使用。 溶剤不可。消毒が必要な場合 は70%アルコールを使用。	01624-000030 4562110152384	1台	176,000円
-------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	----	----------

■ テイクオフベルト 介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品) ● Sサイズ、Mサイズのみ適応

TOFFBXS	ティクオフベルト XSサイズ	90cm(腰囲(推奨)65-80cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg	洗濯機で洗濯が可能。 柔軟剤の使用はお控えください。	4562110152322	1枚	22,000円
TOFFBS	ティクオフベルト Sサイズ ●	105cm(腰囲(推奨)80-90cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		01624-000031 4562110152339	1枚	22,000円
TOFFBM	ティクオフベルト Mサイズ ●	120cm(腰囲(推奨)90-105cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		01624-000032 4562110152346	1枚	22,000円
TOFFBL	ティクオフベルト Lサイズ	135cm(腰囲(推奨)105-125cm)	綿、ポリエステル	耐荷重：150kg		4562110152353	1枚	22,000円

*使用環境により耐荷重は異なります。

■ アクセサリ

TOFFSC	ソフトカバー レッグサポート	横幅約20cm、奥行幅約20cm、 高さ約3cm	アウター：グレー、ポリウレタン (ポリエステルコーティング) インナークッション：ホワイト、 ポリウレタンフォーム	重量：62g *1個あたり	洗濯機で洗濯可能。柔軟剤は 使用不可。消毒が必要な場合は 70%アルコールもしくは45% イソプロパノールを使用。	4562110159529	2枚/ セット	20,000円
--------	-------------------	-----------------------------	--	------------------	--	---------------	------------	---------

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元



本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
名古屋支店 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

輸入元



大阪府北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044