




スウェーデンより登場!!

Hjälpia Positioning Pillow

ヒャルピア ポジショニングピロー

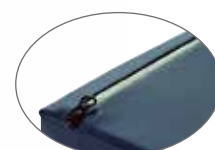

止水ファスナーを採用

ピローの洗濯を管理する上でお悩みはありませんか？

ヒャルピアポジショニングピローシリーズは
『防水透湿性カバー』『止水ファスナー』を標準仕様になっています

- 日常のお手入れは洗剤・消毒液で清拭の運用が可能
- カバー、ピロー、ロール本体は95℃の液温で洗濯が可能（ウェッジピロー本体は洗濯できません）
- 病院や施設に合わせた管理や運用が可能

ケアの統一化はできていますか？

エブリィピロー・サポーターロール・リリーフピローは
偏りが起きにくい高反発ウレタンフォーム入り内容物でケアの統一化をサポートします

- 復元性が高く、使用ごとに内容物の偏りを整えることなくそのまま使用できます
- ピロー・ロール本体が身体の重さを受け止め、身体の形に沿って形成するので、
支えたい身体の部位にピロー・ロールを敷きこむだけのシンプルな使い方が可能です

ウェッジピローは軟質ポリウレタンフォームを使用し、身体の重さを受け止めます

- 側臥位のサポート、スモールチェンジ、除圧等の場面でシンプルな使い方が可能です



EVERY PILLOW

エブリイピロー



エブリイピロー S

エブリイピロー M

エブリイピロー L

■スペック

ピロー本体 + カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
エブリイピロー S	EPS215515	25cm×80cm	18,000円
エブリイピロー M	EPM215516	50cm×60cm	23,000円
エブリイピロー L	EPL215517	50cm×85cm	32,000円

販売単位：1個

カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
エブリイピロー S カバー	EPSC215715	25cm×80cm	8,000円
エブリイピロー M カバー	EMPC215716	50cm×60cm	10,000円
エブリイピロー L カバー	EPLC215717	50cm×85cm	12,000円

販売単位：1枚

エブリイピロー本体の洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

カバーの洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

RELIEF PILLOW

リリーフピロー



■スペック

ピロー本体 + カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
リリーフピロー	RPM217516	60cm×70cm	36,000円

販売単位：1個

カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
リリーフピロー カバー	RPMC217716	60cm×70cm	14,000円

販売単位：1枚

リリーフピロー本体の洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

カバーの洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

SUPPORTING ROLL

サポーターロール



サポーターロール S



サポーターロール M



サポーターロール L

■ スペック

ロール本体 + カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
サポーターロール S	SRS216515	15cm×60cm	21,000円
サポーターロール M	SRM216516	20cm×125cm	36,000円
サポーターロール L	SRL216517	20cm×225cm	54,000円

販売単位：1個

カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
サポーターロール S カバー	SRSC216715	15cm×60cm	9,600円
サポーターロール M カバー	SRMC216716	20cm×125cm	14,000円
サポーターロール L カバー	SRLC216717	20cm×225cm	19,000円

販売単位：1枚

サポーターロール本体の洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

カバーの洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

WEDGE PILLOW

ウェッジピロー



■ スペック

ピロー本体 + カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
ウェッジピロー	WPM218416	69cm×25cm×4～15cm	26,000円

販売単位：1個

カバー			
品 名	型 番	サイズ	定価 (税抜)
ウェッジピロー カバー	WPMC218716	69cm×25cm×4～15cm	13,000円

販売単位：1枚

ウェッジピロー本体の洗濯表示

洗濯不可	タンブル乾燥不可	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止

カバーの洗濯表示

液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

■ 大きなピローで体を支えるシンプルなケアが可能です（使用例）

- 腕や手が腫れている場合に腋下から手までしっかりと重さを支えることができます。 ※1
→ エブリイピローS、サポーターロールS、など。
- 側臥位時に鼠径部からくるぶしまで1つのピローで身体の重さをカバーすることができます。 ※2
→ エブリイピローL、リリーフピロー、など。
- かかとに圧がかからないように足をサポートすることや、尖足の予防のための足底のサポートにも使用できます。 ※3
→ リリーフピロー、など。
- 側臥位時のポジショニング例。 ※4
→ エブリイピローM、エブリイピローL、リリーフピロー、ウェッジピロー、など。



■ スモールチェンジとは？

仰臥位～側臥位など、身体を大きく移動させる体位変換に対して、身体の一部へ介入する体位変換法と定義されている。大きな身体移動である体位変換と比較すると、皮膚表面に生じる力を軽減することができる。またスモールチェンジ法実施により、骨突出部の接触圧が低下し、血流が増加する。さらにスモールチェンジ法は必ずしも2人で行う必要がなく、1人でも実施できるため、看護者・介護者の負担を軽減することが可能である。


出典：「進化を続ける！褥瘡・創傷治療ケアアップデート」 編著 真田 弘美 他

■ ウェッジピローの使用例（スモールチェンジ）

ウェッジピローを使用したスモールチェンジは特に夜間帯の体位変換に有用です。夜間帯での体位変換は、被介護者の睡眠を阻害する要因となったり、介護者の負担が増える要因になります。スモールチェンジを行うことで、被介護者の睡眠を阻害しないように体位変換を行うことができます。

● 使用方法

ウェッジピローをマットレスの下に敷き込み、体を支えます。除圧のために体を支えた状態でウェッジピローを2cmほど引き戻します。

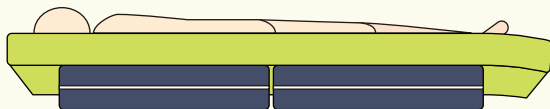

■ 製品情報

- ・ 内容物（エブリイピロー、サポーターロール、リリーフピロー）
高反発ウレタンフォーム / ポリエステル繊維
- ・ 内容物（ウェッジピロー）
軟質ポリウレタンフォーム
- ・ カバー
ポリエステル（ポリウレタンコーティング）

■ 保証期間

本製品の保証期間は、購入日より1年です。
製品取扱時に発生した汚れや破損に関しては保証されません。
耐用年数は2年間です。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>
本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044